

AUTO-CURE ACTIVATOR™

AUTO-CURE ACTIVATOR

Регистрационное удостоверение в РБ № ИМ-7.104884

Активатор химической полимеризации.

Применение:

Активатор для химической самополимеризации адгезивных систем **Prima 2000** и **Prima Quick**

• Применяется для адгезивной (химической полимеризации) фиксации коронок и мостов, включая вкладки и накладки стекловолоконных штифтов и шинирующей ленты для восстановления культи зуба.

Инструкция по применению:

1. Поместите в чистый контейнер равное количество капель **Prima 2000** и активатор **Auto-Cure Activator**. При использовании **Prima Quick** - равное количество **Quick Bond** и активатор **Auto-Cure Activator**. Перемешайте в течение 2 секунд чистой кистью или аппликатором.

2. При помощи той же кисти нанесите необходимое количество смеси и оставьте на 15 секунд.
3. Удалите растворитель мощной струей воздуха в течение 15 секунд или пока не прекратится движение жидкости на поверхности. Если поверхность окажется покрытой не полностью, нанесите дополнительный слой материала и вновь подсушите.

4. Для фиксации используется композитный цемент **High-Q-Bond Adhesive Resin Cement** или любой другой аналогичный материал.

5. Нет необходимости в использовании светоотверждаемых аппаратов.

Содержимое упаковки:

• 1 флакон активатора **Auto-Cure Activator** 4 мл.

Состав:

• Ацетон, гидроксипропанметакрилат, этиловый спирт, окислительные вещества.

Меры предосторожности:

Активатор **Auto-Cure Activator** содержит ацетон и полимеризующиеся мономеры, которые могут вызвать аллергический контактный дерматит у подверженных ему людей. В случае контакта, тщательно промыть водой с мылом. При повышенной чувствительности кожи или, если заранее известна аллергия на метакрилатную смолу, прекратить использование. Избегайте нагрева.

Продукт должен использоваться в соответствии с настоящей инструкцией. Производитель не несет ответственности за вред, принесенный в результате неправильного использования или обращения.

Условие хранения:

Хранить при температуре не выше +24°C.

Срок годности:

2 года с даты изготовления.

Генеральный дистрибьютор в Республике Беларусь:

ООО «Салвум»

220020 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 97 | 24

+375 (29) 634 04 07, +375 (29) 770 22 77

т/ф +375 (17) 395 73 30, salvum.med@hotmail.com



2INS110BJM BL Rev.2 07/2019