

# Perfect™

## ДЕСЕНСИБІЛІЗАТОР

### ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

Десенсibilізатор PERFECT призначений:

- Для усунення болю у відкритих пришийкових ділянках, які не потребують реставрації.
- Для полегшення або запобігання чутливості дентину після препарування зубів під час виготовлення прямих і непрямих реставрацій.

### ВЛАСТИВОСТІ:

Десенсibilізатор PERFECT використовується для лікування надчутливого дентину. Ефект досягається завдяки осаджуванню білків плазми, що знижує проникність дентину та закупорює периферійні дентинні каналці. Він сповільнює потік рідини (що є причиною чутливості) через каналці.

### ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ:

Лікування гіперчутливості дентину:

Лікування гіперчутливості поверхонь дентину призначають тільки у разі сильної больової реакції на теплові, осмотичні або тактильні подразники.

При помірному болю слід використовувати альтернативні методи лікування, такі як десенсibilізаційні зубні пасти.

Очистіть дентин (наприклад, пемзою для чищення), за необхідності зробіть місцеву анестезію. Промийте водою.

1. Захистіть слизові оболонки кофердамом. Переконайтеся, що десенсibilізатор PERFECT контактує тільки з ділянкою, яка потребує лікування.
2. Нанесіть невелику кількість десенсibilізатора PERFECT на поверхню дентину ватною кулькою або пензликом та залиште на 30-60 секунд.
3. Потім ретельно висушіть поверхню струменем повітря, поки пилка рідини не зникне і поверхня більше не блищатиме. Після цього ретельно промийте водою.
4. Глибокі порожнини та/або ділянки поряд із пульпою необхідно покрити відповідною прокладкою перед нанесенням десенсibilізатора.

Лікування дентину, відпрепарованого для реставрації:

1. Захистіть слизові оболонки кофердамом.
2. Видаліть вологу з відпрепарованого дентину струменем повітря під невеликим тиском.
3. Нанесіть десенсibilізатор PERFECT ватною кулькою та залиште на 30-60 секунд. Переконайтеся, що нанесли тільки необхідну мінімально можливу кількість, і що матеріал контактує лише з ділянкою, яка підлягає лікуванню.
4. Ретельно просушіть поверхню дентину струменем повітря, ретельно змийте водою, використовуйте слиновідсмоктувач.
5. Перед застосуванням десенсibilізатора нанесіть на глибокі порожнини та/або ділянки поблизу пульпи відповідні прокладки.

### УВАГА:

Десенсibilізатор PERFECT призначений тільки для використання лікарями-стоматологами.

Небезпечний, містить глутардiальдегiд, 2-гiдроксiетилметакрилат.

- Це речовина, що викликає місцеве подразнення та має токсичну дію.
- Завжди слід застосовувати відповідні запобіжні заходи перед використанням десенсibilізатора PERFECT.
- Для лікування використовуйте тільки мінімально необхідну кількість.
- Шкідливий при вдиханні.
- Подразнює дихальні шляхи.
- Подразнює шкіру.
- Є ризик серйозного пошкодження очей.
- Може викликати підвищену чутливість при вдиханні.
- Може викликати підвищену чутливість при контакті зі шкірою.
- У разі потрапляння в очі негайно промийте великою кількістю води та зверніться до лікаря.
- Одягайте спеціальні рукавички.
- Перед використанням одягайте захисні окуляри та захищайте очі пацієнта від крапель матеріалу.
- Не вдихайте пари / бризки.
- Уникайте контакту зі шкірою.

Десенсibilізатор PERFECT не можна використовувати:

- Якщо неможливо вдатися до необхідних заходів безпеки або неможливо застосувати вказану методику використання.
- Якщо у пацієнта алергія на будь-який з інгредієнтів, що містяться у десенсibilізаторі PERFECT.
- Якщо є біль через пульпіт.
- Якщо відкрита пульпа або перфорований дентин, який оточує пульпу.

Подразнення пульпи може спостерігатися за наявності глибоких порожнин без належного захисту пульпи.

Ділянки порожнин поряд із пульпою необхідно покрити відповідною лайнерною прокладкою перед нанесенням десенсibilізатора.

### ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ:

- 2-гiдроксiетилметакрилат,
- глутардiальдегiд,
- очищена вода.

### ЗБЕРІГАННЯ:

- Не зберігайте при температурі вище 24°C.
- Зберігайте в холодильнику.
- Зберігайте в недоступному для дітей місці.
- Термін придатності 24 місяці з дати виробництва.
- Десенсibilізатор PERFECT не можна використовувати після закінчення терміну придатності (див. попередження на етикетці).