

# High Q Bond Band™

Регистрационное удостоверение в РБ № ИМ-7.104884

## High-Q-Bond Light Cure Band Cement Blue

### Применение:

Специально разработан для фиксации ортодонтических колец.

### Инструкция по применению:

1. Очистите поверхность зубов, предназначенную для работы, используя резиновую чашечку или щеточку, с помощью обычной (не содержащей фтор) пемзы и воды.
2. Промойте и высушите.
3. Изолируйте контактные поверхности.
4. Нанесите небольшое количество цемента High-Q-Bond Band на контактную поверхность ортодонтической конструкции.
5. Сразу же установите ортодонтическую конструкцию на зуб, используя лёгкие вращательные движения. Небольшое количество цемента должно проступить по периферии ортодонтической конструкции. Окончательная установка должна быть проведена до того момента, пока цемент не начнет затвердевать при естественном освещении (примерно 60 секунд).
6. Проведите полимеризацию в стандартном режиме полимеризационной лампой в течение 20 секунд в двух противоположных направлениях. Цемент High-Q-Bond Band может быть легко снят при помощи обычной ватной палочки до того, как он начнет затвердевать, или может быть удален скалером после отверждения.

### Свойства:

- Используется технология светотверждения адгезива для обеспечения дополнительного рабочего времени для более точного расположения ортодонтических конструкций.
- Освобождает фториды.
- Содержит активатор адгезии 4-Мета для надежной и прочной химической фиксации, выделяет фтор.

### Варианты упаковок:

#### #400062 High-Q-Bond Light Cure Band в шприцах:

- High-Q-Bond Light Cure Band в шприцах, 4 гр. - 4 шт.;
- Инструкция по применению

#### #400066 High-Q-Bond Light Cure Band в шприцах:

- High-Q-Bond Light Cure Band в шприцах, 4 гр. - 1 шт.;
- Инструкция по применению

### Генеральный дистрибьютор в Республике Беларусь:

ООО «Салвум»

220020 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 97 | 24

+375 (29) 634 04 07, +375 (29) 770 22 77

т/ф +375 (17) 395 73 30, salvum.med@hotmail.com



# High Q Bond Band™

## Состав:

Уретан диакрилат олигомер, ускорители полимеризации, триэтиленгликольдиметакрилат, 2-гидроксиэтилметакрилат, фотоинициаторы, бариевое алюминоборосиликатное стекло, микрочастицы кварца

## Меры предосторожности:

Охлаждение увеличивает вязкость, делая использование шприца более затруднительным и увеличивая время отверждения. Содержит полимеризуемые мономеры, которые могут вызывать аллергический контактный дерматит у подверженных ему людей. В этом случае тщательно промойте место контакта водой с мылом. Сразу же прекратите использование материала при проявлении аллергической реакции или же, если есть аллергия на метакрилаты. Продукт должен использоваться в соответствии с настоящей инструкцией. Производитель не несет ответственности за вред, принесенный в результате неправильного использования или обращения.

## Условие хранения:

Хранить при температуре не выше +24°C.

## Срок годности:

2 года с даты изготовления.

## Генеральный дистрибьютор в Республике Беларусь:

ООО «Салвум»

220020 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 97 | 24

+375 (29) 634 04 07, +375 (29) 770 22 77

т/ф +375 (17) 395 73 30, [salvum.med@hotmail.com](mailto:salvum.med@hotmail.com)

