

# Porcelain Fix™

## Porcelain Fix Preparation Kit

### Регистрационное удостоверение в РБ № ИМ-7.104884

Набор материалов стоматологических адгезивных для обработки керамики.

#### Применение:

Комплект Porcelain Fix Preparation Kit предназначен для улучшения адгезии при подготовки фарфоровых дентальных изделий (вставок, коронок, зубов и пр.) к установке, а также при восстановлении и ремонте поврежденных керамических или металло-керамических конструкций.

#### Свойства:

- Porcelain Fix Preparation Kit набор материалов для подготовки к приклеиванию фарфоровых дентальных изделий (вставок, коронок и пр.). Porcelain Fix Preparation Kit состоит из Porcelain Etch™ и Porcelain Silane™.
- Porcelain Etch™ специальная кислота для травления фарфора. Придает микроскопическую шероховатость поверхности, обеспечивает прочное механическое сцепление с композитами и адгезивами.
- Porcelain Silane™ - отдельный компонент для обработки поверхности, усиливает сцепление и надежность адгезии к протравленному фарфору.

#### Содержимое упаковки:

- Porcelain Etch™ в шприцах 1,2 мл - 2 шт.;
- Porcelain Silane™ во флаконах 2 мл - 2 шт.;
- Шприцы пустые для Porcelain Silane™ 1,2 мл - 2 шт.;
- Наконечники аппликационные - 4 шт.;
- Наконечники с микроапликатором - 4 шт.;

#### Состав:

Porcelain Etch™: плавиковая кислота 8%, вода 90,5%, загуститель 1,5%.  
Porcelain Silane™: этанол 97%, глицидоксипропилтриметоксисилан 3%.

#### Условие хранения:

Хранить при температуре не выше +24°C.

#### Срок годности:

2 года с даты изготовления.

## Ген. дистрибьютор в Республике Беларусь:

ООО «Салвум»

220020 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 97 | 24

+375 (29) 634 04 07, +375 (29) 770 22 77

т/ф +375 (17) 395 73 30, salvum.med@hotmail.com



# Porcelain Fix™

## Porcelain Fix Preparation Kit

Регистрационное удостоверение в РБ № ИМ-7.104884

Набор материалов стоматологических адгезивных для обработки керамики.

### Инструкция по применению:

#### Подготовка керамической поверхности к приклейке:

1. В случае использования во рту пациента, изолируйте протравливаемую поверхность.
2. Подготовка отдельной керамической коронки: перед травлением, бором средней твердости, удалите глазурированное покрытие с приклеиваемой поверхности, чтобы нанести достаточный для прочности и эластичности слой адгезива или композита. Смойте остатки с керамической поверхности и высушите влагу воздухом.
3. Микрокисточкой нанесите Porcelain Etch на поверхность керамики и оставьте на 60 секунд.
4. Тщательно прополощите водой керамику для удаления кислоты и высушите. Протравленная керамика должна иметь белый «замороженный» узор. В противном случае повторите процедуру травления.
5. Нанесите кисточкой Porcelain Silane на протравленную поверхность и тщательно высушите потоком воздуха.

**Примечание:** процедуры реставрации и ремонта керамики указаны в иллюстрированных инструкциях для High-Q-Bond Adhesive Reisin Cement.

### Меры предосторожности:

Будьте осторожны и осмотрительны при применении Porcelain Etch. Остерегайтесь контакта со слизистой оболочкой рта, кожей и глазами. При случайном контакте, обильно смойте водой и, в случае необходимости, окажите необходимую медицинскую помощь. В случае применения Porcelain Etch во рту пациента, рекомендуется изолировать обрабатываемую поверхность.

Продукт должен использоваться в соответствии с настоящей инструкцией. Производитель не несет ответственности за вред, причиненный в результате неправильного использования или обращения.

### Ген. дистрибьютор в Республике Беларусь:

ООО «Салвум»

220020 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 97 | 24

+375 (29) 634 04 07, +375 (29) 770 22 77

т/ф +375 (17) 395 73 30, salvum.med@hotmail.com

