

Quick SEAL™

Регистрационное удостоверение в РБ № ИМ-7.104884


Quick Seal SE Pit & Fissure Sealant

Материал стоматологический пломбировочный светоотверждаемый самопротравливающий для фиссур.


Применение:

Применяется для профилактического пломбирования фиссур и бугров жевательных зубов.


Инструкция по применению:

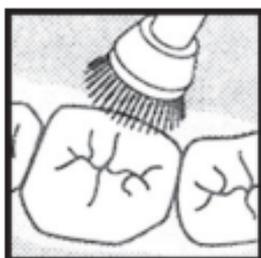

1. Тщательно очистить поверхность эмали при помощи или чистящей пасты, не содержащей масла или фторидов, или при помощи пемзы и щеточки. Тщательно промыть водой и высушите струей сжатого воздуха. Остерегайтесь попадания слюны на высушенную поверхность.

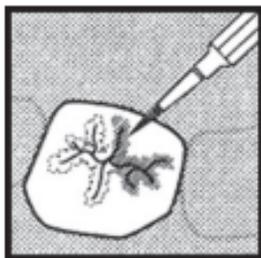

2. Установите новый аппликационный наконечник и аккуратно выдавите небольшое количество материала на фиссуру. Проследите, чтобы материал полностью покрыл поверхность фиссуры. Вы можете использовать одноразовую кисточку, микроаппликатор или аппликационный наконечник шприца для лучшего нанесения материала и удаления воздушных пузырьков. Подождите 15 секунд.

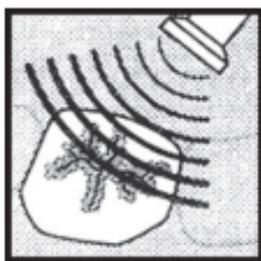

3. Полимеризуйте в течение 20 секунд. Проверьте прикус.

Генеральный дистрибьютор в РБ:

ООО «Салвум»

220020 г. Минск,

ул. Тимирязева, д. 97|24

+375 (29) 634 04 07, +375 (29) 770 22 77

т/ф +375 (17) 395 73 30

salvum.med@hotmail.com

2CRB033 BL Rev.2 07/2019

SALVUM

BJM LAB

CE
0425



Quick SEAL™

Регистрационное удостоверение в РБ № ИМ-7.104884

Свойства:

- Однокомпонентный материал
- Одношаговый материал (не требует дополнительного протравливания и смывания)
- Легкое и аккуратное применение, используя технику прямого нанесения из шприца.
- Светоотверждаемый материал.
- Низкая вязкость, превосходные свойства текучести, оптимальная смачиваемость для фиссур.
- Содержит освобожденные фториды.

Содержимое упаковки:

Quick-Seal™ в шприцах, 1.2 мл - 2 шт.;
Наконечники аппликационные - 4 шт.

Состав:

Олигомер уретандиметакрилата; Bis-GMA, Триэтиленгликольдиметакрилат; 2-Гидроксиэтилметакрилат; Самопротравливающее вещество; Белый краситель; Микрочастицы стекла; Инициаторы светополимеризации.

Меры предосторожности:

Использование Quick-Seal™ противопоказано:

Если фиссуры уже поражены кариесом, если нельзя обеспечить сухость рабочей поверхности при применении и полимеризации Quick-Seal™, Если пациент знает об имеющейся аллергии к каким-либо компонентам Quick-Seal™. Содержит полимеризуемые мономеры, которые могут вызвать аллергический контактный дерматит у подверженных ему людей. Тщательно промыть водой с мылом после контакта. Если замечается реакция на коже, или если существуют аллергии на метакрилатные смолы, прекратите использование.

Продукт должен использоваться в соответствии с настоящей инструкцией. Производитель не несет ответственности за вред, принесенный в результате неправильного использования или обращения.

Условие хранения:

Хранить при температуре не выше +28°C.

Срок годности:

2 года с даты изготовления.