

HIGH Q BOND™

ADHESIVE RESIN CEMENT

РУ №ФСЗ 2011/10683 от 20.09.2011г.

High-Q-Bond Adhesive Resin Cement

Цемент композитный.

Применение:

High-Q-Bond Adhesive Resin Cement используется для постоянной фиксации коронок и мостовидных протезов, различных видов вкладок, керамических коронок и мостовидных протезов на стекловолоконном каркасе, ортодонтических конструкций, адгезивного покрытия металлических каркасов. Используется по методике тотального протравливания с применением адгезивных систем.

Инструкции по применению:

Выпустить немного материала из картриджа перед первым использованием для подачи равного количества материала – базы и катализатора. Наденьте смесительный наконечник на двойной смесительный шприц. См. Инструкцию по использованию двойных смесительных шприцев.

- Рабочее время при комнатной температуре – минимально 2 минуты
- Окончательное отверждение при комнатной температуре – около 5 минут
- Внутриротовое отверждение – около 3,5 минут
- Светоотверждение – около 20 секунд

В связи с широким спектром применения в различных клинических ситуациях используйте иллюстрированные методические инструкции.

Свойства:

- High-Q-Bond Adhesive Resin Cement – это универсальный двухкомпонентный постоянный цемент двойного отверждения с широким спектром применения.
- High-Q-Bond Adhesive Resin Cement представляет собой цемент химического отверждения, который может полимеризоваться также с помощью светополимеризационной лампы для его мгновенного отверждения и обеспечения высочайшей прочности по краям.
- Имеет превосходную адгезию к различным сплавам, керамике, дентину, эмали и амальгамам (см. графические методические иллюстрации по использованию)
- Проведя предварительную полимеризацию в течение 10 сек., вы можете удалить излишки материала до его полного отверждения.
- High-Q-Bond Adhesive Resin Cement обеспечивает великолепную фиксацию и идеальную краевую адаптацию реставраций.

Варианты упаковок:

#100050 High-Q-Bond Adhesive Resin Cement, в наборе:

- 1 шприц; 3 мл. Основы High-Q-Bond Adhesive Resin Cement
- 1 шприц; 3 мл. Катализатора High-Q-Bond Adhesive Resin Cement
- 1 блокнот для замешивания
- 10 шпателей для замешивания

#100050 AM High-Q-Bond Adhesive Resin Cement Automix, в наборе:

- 1 шприц; 5 мл. High-Q-Bond Adhesive Resin Cement
- 10 наконечников смесительных
- 20 наконечников аппликационных

HIGH Q BOND™

ADHESIVE RESIN CEMENT

Состав:

База: алифатический полиэфир (уретан акрилат), гидроксиэтилметакрилат, перекрестносвязанный мономер, фотоинициаторы, акселератор адгезии, стеклянный наполнитель.

Катализатор: триэтиленгликоль диметакрилат, бис-фенол-а-глиуцидилдиметакрилат, пероксид бензоила, стеклянный наполнитель.

Меры предосторожности:

Применяется только по методике тотального травления при фиксации ортопедических конструкций на естественные зубы. High-Q-Bond Adhesive Resin Cement содержит полимеризующиеся мономеры, которые могут вызвать аллергический контактный дерматит у подверженных ему людей. Тщательно промыть водой с мылом после контакта. При повышенной чувствительности кожи или, если заранее известна аллергия на метакрилатную смолу, прекратить использование.

Продукт должен использоваться в соответствии с настоящей инструкцией. Производитель не несет ответственности за вред, принесенный в результате неправильного использования или обращения.

Условие хранения:

Хранить при температуре не выше +24°C.

Срок годности:

2 года с даты изготовления.

Дистрибьютор в России:

ООО «Медента»
Россия, 123308, Москва,
Новохорошевский проезд, д. 25.
Контактная информация:
Тел. горячей линии +7-499-946-4609.
shop@medenta.ru | www.medenta.ru

2INS041BJM Rev.5 11/2022



BJM LAB 