

Auto-Cure Activator™

KZ

PRIMA 2000 немесе PRIMA QUICK BOND-пен қолдануға арналған химиялық қатайтылатын Активатор

Қолданылуы

PRIMA 2000 материалын қатайту үшін Активатор мына жағдайларда қолданылады:

- Тіс қаптамасы мен көпір тектес протездерді, вкладка/накладканы адгезивтік бекіту үшін.
- Амальгамамен тісті қалпына келтіру үшін.
- Жарықпен қатайтуға мүмкіндік болмаған кезде.

Қолдану жөнінде нұсқаулық

1. Палеткада PRIMA 2000 мән AUTO-CURE ACTIVATOR-дың тең мөлшерін жақсылап араластыру керек
2. Дайын қоспаны аппликаторды қолдану отырып жағып, 15 секундқа қалдыру қажет.
3. Ауаның қатты ағымын 15 секунд бойы немесе адгезив қозғалысын толық тоқтатқанша қолдана отырып еріткішті кетіру керек. Қажет болған жағдайда екінші рет жағып келтіру керек.
4. Қалпына келтіруді немесе бекітуді аяқтау қажет.

Сақтық шаралары

AUTO-CURE ACTIVATOR-дың құрамында сезімтал терісі бар адамдарда жанаспалы аллергиялық дерматит тудыратын ацетон және полимерленетін мономерлер бар. Көзбен теріге тиюден абай болу керек. Көзбен теріге тиген жағдайда сумен мұқият жуу қажет.

Егер де науқастың терісі сезімтал болса немесе полиметилакрилатқа аллергия бар болса, қолдануды дереу тоқтату қажет.

Негізгі құрамдас бөліктері

- Ацетон
- Гидроксиэтилметакрилат
- Этил спирті
- Тотықтандырғыш

Сақтау шарттары

- 24°C-ден аспайтын температурада сақтау керек.
- Шамадан тыс қыздырудан абай болу керек.
- Салқын күйде сақтау керек.

B.J.M. Laboratories Ltd.
12 Hassadna St., Industrial Park,
Or-Yehuda 6022011, Israel
tel. 972-3-7353888 fax. 972-3-7353020
Info@bjmlabs.com www.bjmlabs.com

QUASER S.r.l.
Via Pian due Torri 19, 00146 Rome, Italy
tel. 39-06-55282325 fax. 39-06-55290821
info@quasersrl.it www.quasersrl.it

CE
0425



EC REP

Auto-Cure Activator™

RU

Активатор химического отверждения для использования с PRIMA 2000 или PRIMA QUICK BOND

Показания к применению

Активатор применяется для самоотверждения PRIMA 2000 в случаях:

- Адгезивной фиксации коронок и мостовидных протезов, вкладок, накладок.
- Реставрации амальгамами.
- При невозможности светотверждения.

Инструкция по применению

1. Хорошо смешать равное количество PRIMA 2000 и AUTO-CURE ACTIVATOR в палетке.
2. Используя аппликатор, нанести смесь и оставить на 15 секунд.
3. Удалить растворитель сильной струей воздуха в течении 15 секунд или до момента, когда адгезив прекращает движение. При необходимости нанести второй слой, просушить.
4. Завершить реставрацию или фиксацию.

Меры предосторожности

AUTO-CURE ACTIVATOR содержит ацетон и полимеризуемые мономеры, которые могут вызвать аллергический контактный дерматит у людей с повышенной чувствительностью кожи. Избегать попадания в глаза и на кожу. В случае контакта тщательно промыть водой. Если кожа чувствительная, или существует аллергия на полиметилакрилат, немедленно прекратить использование.

Основные компоненты

- Ацетон
- Гидроксиэтилметакрилат
- Этиловый спирт
- Окислитель

Хранение

- Хранить при температуре не выше 24°C.
- Избегать перегрева.
- Хранить охлажденным.