

# High-Q-Bond SE™

**UA Самоадгезивний / самопротравлюючий композитний цемент подвійного твердіння для постійної фіксації**

## ВЛАСТИВОСТІ:

**HIGH Q BOND SE** – це композитний цемент для постійної фіксації, який не потребує протравлювання, праймування та бондування. Має подвійне затвердіння: хімічне та полімеризація світлом. Система для автоматичного змішування «Automix» дозволяє внести матеріал безпосередньо на внутрішню поверхню конструкції або в порожнину зуба.

## ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

- Постійна фіксація керамічних і композитних коронок, мостів, вкладок, накладок
- Постійна фіксація металокерамічних, металокерамічних, металевих ортопедичних конструкцій всіх видів
- Фіксація скловолоконних і металевих штифтів та кускових вкладок

## ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ:

- Триетиленгліколь диметакрилат
- BisGMA
- Перекис бензолу
- Барій алюмоборосилікатне скло
- Колоїдальний двоокис кремнію
- Модифікований уретаном диметакрилат
- Фотоініціатор
- 4-META

## РЕКОМЕНДОВАНА ТРИВАЛІСТЬ ЗАСВІЧУВАННЯ:

При використанні лампи L.E. Demetron I – 20 секунд; при використанні лампи Optilux 501 в режимі Boost – 20 секунд, в режимі Ramp – 20 секунд, в режимі Regular – 20 секунд. При використанні інших ламп дотримуйтеся відповідних інструкцій виробника.

## ПРИМІТКА:

- **HIGH Q BOND SE** не показаний для ремонту реставрацій із кераміки або фіксації мериландських мостовидних протезів.
- Насадки для автоматичного змішування призначені для одноразового використання.

## ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ:

1. Видаліть тимчасову конструкцію.  
**Примітка:** використовуйте лише тимчасові цементи, які не містять евгенол. Застосування тимчасових цементів із вмістом евгенолу може завадити полімеризації цементу **HIGH-Q-BOND SE**.
2. Ретельно промийте.
3. Підсушіть відпрепаровану поверхню струменем повітря (не пересушуйте).
4. Приміряйте конструкцію та переконайтеся в належному припасуванні.
5. Перед використанням видавіть зі шприца невелику кількість матеріалу. Встановіть змішувальну насадку на шприц автоматичного змішування.
6. Дозування матеріалу може виконуватися наступним чином:

### Вкладки / накладки

Приєднайте до змішувальної насадки внутрішньоротову насадку, що входить до комплекту, та видавіть цемент безпосередньо у відпрепаровану порожнину зуба, покриваючи ним усі поверхні. Обережно встановіть конструкцію у відпрепаровану порожнину, при цьому надлишок цементу може видавлюватися з усіх сторін.

### Коронки

Видавіть цемент безпосередньо на внутрішню поверхню коронки або на зону препарування, покриваючи ним усі поверхні. Обережно встановіть коронку, при цьому надлишок цементу може видавлюватися з-під усіх країв конструкції.

### Штифти

Приєднайте внутрішньоротову насадку XXF до змішувальної насадки. Внесіть цемент в кореневий канал. Введіть штифт та злегка похитайте його, щоб видалити можливі бульбашки повітря в товщі матеріалу.

7. Встановивши в правильному положенні

конструкцію, видаліть надлишки цементу. Найкраще це робити скейлером або зондом після набуття матеріалом гумоподібної консистенції. Цемент набуває гумоподібного стану, якщо його «прихопити» світлом полімеризатора протягом 2 секунд, або через 1.5 – 2 хвилини самостійного твердіння. Для досягнення кращих результатів рекомендується залишити цемент на 1.5 хвилини для самостійного твердіння, а потім «прихопити» світлом.

### 8. ЧАС ЗАТВЕРДІННЯ:

- Робочий час складає 2 хвилини.
- Час твердіння в порожнині рота – 3 хвилини.
- Час полімеризації світлом: 20 секунд (дотримуйтеся рекомендацій виробника).
- Видаливши надлишки цементу, полімеризуйте світлом усі поверхні, зокрема краї конструкції, протягом 20 секунд.

9. Для фінішної обробки в міжпроксимальних ділянках використовуйте штрипси. Для полірування країв реставрації використовуйте полірувальні диски, чашки або голівки.  
10. Перевірте оклюзію.

**Примітка:** змішувальні насадки одноразові та призначені для використання лише для одного пацієнта.

### УВАГА:

Неполімеризовані метакрилатні смоли можуть спричинити контактний дерматит та пошкодити пульпу. Не допускайте потрапляння на шкіру, в очі та на слизову оболонку. У випадку такого контакту промийте уражену ділянку великою кількістю води.

### ЗБЕРІГАННЯ ТА ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:

Зберігайте при температурі до 24°C. Зберігайте його в холодильнику для максимального терміну придатності. **HIGH-Q-BOND SE** не рекомендований для використання після закінчення терміну придатності, що вказаний на упаковці.

 **B.J.M. Laboratories Ltd.**  
12 Hassadna St., Industrial Park  
Or-Yehuda 6022011, ISRAEL  
Fax. 972-3-7353020  
web: www.bjmlabs.com

### Уповноважений представник в Україні:

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«КРИСТАР-ЦЕНТР»  
вул. Межигірська, буд. 50, кв. 2, м. Київ, 04071, Україна  
тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua, kristar.ua

